

Urgo opatrunki na oparzenia i rany powierzchniowe 1- x 7 cm, 4 sztuki



Cena: 35,84 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	4 sztuki
Postać	Opatrunek
Producent	URGO SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Regenerujące
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opatrunki na oparzenia marki URGO to wyrób medyczny zaprojektowany z myślą o skutecznej ochronie uszkodzonej skóry przed działaniem czynników zewnętrznych, wspomagający szybsze gojenie. Dzięki specjalnej strukturze nie przylegają do rany, co umożliwia bezbolesną i łatwą wymianę. Są przewiewne, co sprzyja regeneracji, a zastosowane składniki – warstwa ochronna, hydrokoloidy i wazelina – pomagają łagodzić ból i zapewniają komfort podczas leczenia. W jednym opakowaniu znajduje się 4 opatrunki o wymiarach 7 x 10 cm

Stosowanie

- W przypadku wszystkich oparzeń: Oczyszczyć ranę środkiem antyseptycznym bez alkoholu. Opłucz wodą lub roztworem soli fizjologicznej URGO.
- Ostrożnie osusz ranę sterylnym gazikiem. W przypadku oparzenia nigdy nie stosuj środków antyseptycznych zawierających eozynę.
- Zdjąć warstwę ochronną z plastra. Nałożyć na obszar przeznaczony do leczenia - o ile to możliwe, nie ruszać pęcherza, ponieważ chroni przed zakażeniem. Jeżeli pęcherz jest pęknięty, odkaż obszar. Nie usuwaj martwej skóry, jeżeli sama nie odpada.
- Stosuj od 5 do 6 dni, przy czym opatrunek należy zmienić po raz pierwszy po ich 24 godzinach, a następnie zmieniać co 48 godzin.

Przeznaczenie

Do zastosowania przy leczeniu oparzeń powstałych przy pracach domowych, I i II stopnia, a także powierzchniowych ran.

Ostrzeżenia

Nie stosować na głębokie oparzenia drugiego stopnia, oparzenia trzeciego stopnia oraz na oparzenia twarzy. W powyższych przypadkach konieczna jest wcześniejsza konsultacja z lekarzem.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Producent

Laboratoria Polfa Łódź Sp. z o. o.
Al. Jerozolimskie 142B,
02-305 Warszawa