

UrgoClean Ag, opatrunek, 15 cm x 20 cm, 1 sztuka



Cena: 67,10 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	URGO SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Antyseptyczne, Gojące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Opatrunek **UrgoClean Ag** to sterylna, włókninowa wkładka wykonana z wysoko chłonnych włókien poliakrylanowych, które cechują się wysoką kohezją i właściwościami hydro-oczyszczającymi. Włókna poliakrylanu są cieplnie związane i ułożone równolegle do powierzchni rany, co nadaje opatrunkowi zdolność efektywnego pochłaniania i zatrzymywania tkanek martwiczych oraz odporność na rozciąganie. Wkładka jest pokryta miękką, przylegającą matrycą gojącą TLC (technologia lipidowo-koloidowa) impregnowaną srebrem, która zapewnia ochronę przeciwbakteryjną, łatwo przekształca się w żel, wspomaga drenaż resztek martwiczych oraz ułatwia nakładanie i zdejmowanie opatrunku.

Wskazania

Opatrunek UrgoClean Ag jest wskazany do miejscowego leczenia:

- przewlekłych (owrzodzeń kończyn dolnych, odleżyn, owrzodzeń stopy cukrzycowej) ran z wysiękiem zagrożonych zakażeniem lub z objawami miejscowego zakażenia, począwszy od stadium oczyszczania.
- ostrych (oparzeń, ran pourazowych, ran chirurgicznych) ran z wysiękiem zagrożonych zakażeniem lub z objawami miejscowego zakażenia, począwszy od stadium oczyszczania.

Działanie

Wyrób medyczny UrgoClean Ag :

- posiada charakterystyczne właściwości pochłaniania i zatrzymywania martwicy rozpuszczalnej z rany oraz wykazuje odporność na rozciąganie.
- wkładka o właściwościach hydro-oczyszczających pokryta jest miękką, przylegającą matrycą gojącą (TLC: technologia lipidowo-koloidowa) impregnowaną srebrem. Matryca TLC-Ag zapewnia ochronę przeciwbakteryjną i z łatwością ulega żelowaniu, pomagając w ten sposób w drenażu martwicy rozpuszczalnej.
- po zetknięciu się z wysiękiem z rany, matryca TLC-Ag ulega żelowaniu, tworząc wilgotne środowisko sprzyjające gojeniu się rany.
- włókna poliabsorbentu (poliakrylan) o właściwościach hydro-oczyszczających, pochłaniają wysięk i tworzą żel. Włókna te wiążą

martwicę rozpułwną, pochłaniając ją i drenując, wspomagając jej eliminację (autolityczne oczyszczanie rany).

- jony Ag+ nadają opatrunkowi UrgoClean Ag działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać ilość bakterii w okolicach rany.
- utworzony żel nie przywiera do rany, co pozwala na łatwe zdejmowanie opatrunku z niewielkim uszkodzeniem, bez uszkodzenia gojących się tkanek, bezbolesne lub z niewielkim bólem.

Sposób użycia

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk (z wyjątkiem przeciwwskazanych antyseptyków), ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed zastosowaniem opatrunku.
- Zastosowanie UrgoClean Ag nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.
- W trakcie procesu oczyszczania rany z tkanek martwiczych, rana może wydawać się większa. Dzieje się tak z powodu skutecznego usuwania martwicy rozpułwnej.

2. Nakładanie opatrunku:

- Zdjąć folię ochronną.
- Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku UrgoClean Ag do rany i jej obrysu.
- Opatrunek UrgoClean Ag można przyciąć jałowymi nożyczkami, aby w razie potrzeby dostosować wielkość opatrunku do rany.
- W razie potrzeby przykryć opatrunek UrgoClean Ag drugim opatrunkiem odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.
- Zabezpieczyć bandażem.
- Założyć bandaż uciskowy, jeśli zostało to zalecone.

3. Zmiana opatrunku:

- Opatrunki UrgoClean Ag należy zmieniać co 1-2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- Maksymalna długość leczenia opatrunkiem UrgoClean Ag to jeden miesiąc.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na srebro.
- Nie stosować UrgoClean Agg jako gąbki chirurgicznej do silnie krwawiących ran.
- Nie stosować u pacjentów poddawanych diagnostyce obrazowej metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Uwagi

- Leczenie opatrunkiem UrgoClean Ag należy prowadzić pod kontrolą lekarską.
- Zastosowanie opatrunku nie wyklucza potrzeby odpowiedniego ogólnoustrojowego leczenia przeciwbakteryjnego zainfekowanej rany zgodnie z lokalnie przyjętymi standardami.
- Miękka, przylegająca matryca gojąca ze srebrem (TLC-Ag) zawarta w opatrunku UrgoClean Ag przykleja się do lateksowych rękawic chirurgicznych. Dlatego należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się opatrunkiem, unikając kontaktu z miękką, przylegającą stroną lub posługując się sterylnymi szczypcami..
- Ze względu na brak wystarczających danych, stosowanie produktu u kobiet ciężarnych lub karmiących piersią, nie jest zalecane.
- Nie stosować w komorze hiperbarycznej.
- Opakowanie pojedyncze, przeznaczone do jednorazowego użyciu: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użyciu może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone.
- Nie sterylizować ponownie opatrunku.
- Zutylizować zgodnie z obowiązującą praktyką.
- Cały niewykorzystany opatrunek należy zutylizować.
- Maksymalna długość leczenia opatrunkiem UrgoClean Ag to jeden miesiąc.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove