

UrgoClean, opatrunek, 15 cm x 15 cm, 1 sztuka

Cena: 30,16 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	URGO SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Gojące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UrgoClean to wyrób medyczny, będący miękkim, przylegającym opatrunkiem wykonanym z wysoko chłonnych włókien. Wkładka opatrunku jest pokryta warstwą TLC (technologia lipidowo-koloidowa), która łatwo przekształca się w żel po kontakcie z raną, co wspomaga usuwanie martwych tkanek oraz ułatwia aplikację i zdejmowanie opatrunku. Wymiary opatrunku to 15 cm x 15 cm.

Wskazania

Opatrunek UrgoClean jest wskazany w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych:

- przewlekłych ranach z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej),
- ranach z potencjalnymi tkankami martwiczymi: ranach ostrych (oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe),
- ranach pooperacyjnych, ranach nowotworowych.

Działanie

Mechanizm działania UrgoClean

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, cząstki lipidowo-koloidowe z warstwy TLC tworzą żel, stwarzając wilgotne środowisko korzystne dla oczyszczania rany z tkanki martwiczej.
- Równocześnie wysokochłonne włókna poliakrylanu tworzą żel i wiążą tkanki martwicze, pochłaniając je i drenując, wspomagając ich eliminację (autolityczne oczyszczanie).
- Wiązanie i drenaż tkanek martwiczych przez strukturę wysokochłonną UrgoClean połączoną z warstwą TLC sprzyja fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych i wysięku.

Sposób użycia

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, następnie przepłukać roztworem soli fizjologicznej.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoClean.

- Zastosowanie opatrunku UrgoClean nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.

2. Nakładanie opatrunku:

- Zdjąć folię ochronną.
- Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku UrgoClean do rany i jej obrysu.
- Opatrunek UrgoClean można przyciąć jałowymi nożyczkami, aby w razie potrzeby dostosować wielkość opatrunku do rany.
- Przykryć opatrunek UrgoClean drugim opatrunkiem odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.

3. Zmiana opatrunku:

- Opatrunki UrgoClean należy zmieniać co 1 do 2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- Cały niewykorzystany opatrunek należy zutylizować zgodnie z miejscową praktyką.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na UrgoClean.
- Nie stosować UrgoClean jako gąbki chirurgicznej w silnie krwawiących ranach.

Uwagi

- Miękka, przylegająca warstwa TLC opatrunku UrgoClean przykleja się do lateksowych rękawic chirurgicznych. Z tego powodu należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się opatrunkiem, unikając kontaktu z miękką, przylegającą stroną lub posługując się sterylnymi kleszczykami.
- Nie zaleca się równoczesnego stosowania kremu, płynu, maści ani emulsji.
- Ze względu na nieokluzyjny charakter tego opatrunku, opatrunek UrgoClean można stosować na zakażone rany pod ścisłą kontrolą lekarską.
- W trakcie procesu oczyszczania rany z tkanek martwiczych rana może wydawać się większa. Dzieje się tak z powodu skutecznego usuwania tkanek martwiczych.
- Opatrunek UrgoClean nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Nie sterylizować ponownie opatrunku.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Opakowanie pojedyncze, sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove