

UrgoClean, opatrunek, 15 cm x 20 cm , 1 sztuka



Cena: 39,05 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	URGO SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Gojące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UrgoClean to medyczny opatrunek jednorazowy o wymiarach 15 cm x 20 cm. Jest to miękki, przylegający opatrunek wykonany z wysoko chłonnych włókien. Wkładka pokryta jest warstwą TLC (technologia lipidowo-koloidowa), która po kontakcie z raną łatwo zamienia się w żel, co ułatwia drenaż martwych tkanek i umożliwia łatwiejsze nakładanie oraz zdejmowanie opatrunku.

Wskazania

Opatrunek UrgoClean jest wskazany w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych:

- przewlekłych ranach z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej),
- ranach z potencjalnymi tkankami martwiczymi: ranach ostrych (oparzenia, otarcia skóry, rany pourazowe),
- ranach pooperacyjnych, ranach nowotworowych.

Działanie

Mechanizm działania UrgoClean

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, cząstki lipidowo-koloidowe z warstwy TLC tworzą żel, stwarzając wilgotne środowisko korzystne dla oczyszczania rany z tkanki martwiczej.
- Równocześnie wysokochłonne włókna poliakrylanu tworzą żel i wiążą tkanki martwicze, pochłaniając je i drenując, wspomagając ich eliminację (autolityczne oczyszczanie).
- Wiązanie i drenaż tkanek martwiczych przez strukturę wysokochłonną UrgoClean połączoną z warstwą TLC sprzyja fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych i wysięku.

Sposób użycia

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, następnie przepłukać roztworem soli fizjologicznej.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoClean.

- Zastosowanie opatrunku UrgoClean nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.

2. Nakładanie opatrunku:

- Zdjąć folię ochronną.
- Przyłożyć miękką, przylegającą stronę opatrunku UrgoClean do rany i jej obrysu.
- Opatrunek UrgoClean można przyciąć jałowymi nożyczkami, aby w razie potrzeby dostosować wielkość opatrunku do rany.
- Przykryć opatrunek UrgoClean drugim opatrunkiem odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.

3. Zmiana opatrunku:

- Opatrunki UrgoClean należy zmieniać co 1 do 2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby (nie rzadziej niż co 7 dni), w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- Cały niewykorzystany opatrunek należy zutylizować zgodnie z miejscową praktyką.

Ostrzeżenia

- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na UrgoClean.
- Nie stosować UrgoClean jako gąbki chirurgicznej w silnie krwawiących ranach.

Uwagi

- Miękka, przylegająca warstwa TLC opatrunku UrgoClean przykleja się do lateksowych rękawic chirurgicznych. Z tego powodu należy zachować ostrożność przy posługiwaniu się opatrunkiem, unikając kontaktu z miękką, przylegającą stroną lub posługując się sterylnymi kleszczykami.
- Nie zaleca się równoczesnego stosowania kremu, płynu, maści ani emulsji.
- Ze względu na nieokluzyjny charakter tego opatrunku, opatrunek UrgoClean można stosować na zakażone rany pod ścisłą kontrolą lekarską.
- W trakcie procesu oczyszczania rany z tkanek martwiczych rana może wydawać się większa. Dzieje się tak z powodu skutecznego usuwania tkanek martwiczych.
- Opatrunek UrgoClean nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Nie sterylizować ponownie opatrunku.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Opakowanie pojedyncze, sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove