

UrgoClean ROPE, opatrunek, 5 cm x 40 cm, 1 sztuka

Cena: 27,20 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	URGO SP.Z O.O.
Przeznaczenie	Gojące, Oczyszczające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UrgoClean ROPE to jednorazowy wyrób medyczny w postaci taśmy z włókien o wysokiej chłonności oraz sterylnym miernikiem. Opatrunek ma wymiary 5 cm x 40 cm.

Wskazania

UrgoClean ROPE jest wskazany:

- W fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych w ranach jam ciała i zatok z wysiękiem,
- Przewlekłych ranach z wysiękiem (owrzodzenia kończyn dolnych, odleżyny, owrzodzenia stopy cukrzycowej),
- Ostrych (ranach pourazowych), ranach pooperacyjnych i ranach nowotworowych.

Działanie

Mechanizm działania UrgoClean ROPE:

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, wysokochłonne włókna poliakrylanowe tworzą żel i wiążą tkanki martwicze, pochłaniając je i drenując, wspomagając ich eliminację (autolityczne oczyszczanie).

Sposób użycia

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, następnie przepłukać roztworem soli fizjologicznej.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed zastosowaniem UrgoClean ROPE.
- Zastosowanie UrgoClean ROPE nie zastępuje mechanicznego oczyszczenia rany, o ile jest konieczne.

2. Nałożenie opatrunku:

- Otworzyć opakowanie blistrowe.

- W razie potrzeby przy użyciu miernika ocenić głębokość rany.
- Włożyć UrgoClean ROPE luźno do rany przy użyciu minimalnego ucisku.
- W razie potrzeby produkt UrgoClean ROPE można przyciąć (na długość), jałowymi nożyczkami, aby dostosować długość produktu do głębokości rany. W przypadku ran z niewielkim wysiękiem, konieczne może być nasączenie produktu UrgoClean ROPE solą fizjologiczną przed jego użyciem.
- Należy upewnić się, że produkt UrgoClean ROPE jest widoczny i może być z łatwością usunięty z rany jamy ciała.
- Przykryć UrgoClean ROPE drugim opatrunkiem, odpowiednim dla położenia rany i ilości wysięku.

3. Zmiana opatrunku:

- UrgoClean ROPE należy zmieniać co 1 do 2 dni w fazie oczyszczania rany z tkanek martwiczych, a następnie w miarę potrzeby, w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- Miernik i cały niewykorzystany UrgoClean ROPE należy zutylizować zgodnie z miejscową praktyką.

Przeciwwskazania

- Nie stosować w ranach przetok o średnicy mniejszej od średnicy miernika.
- Nie stosować w suchych ranach.
- Ponieważ produkt jest niewchłaniający, nie należy stosować go jako gazy chirurgicznej.
- Nie stosować wewnątrz jamy nosowej w chirurgii nosa i zatok.
- Nie stosować w przypadku potwierdzonej nadwrażliwości na produkt UrgoClean ROPE.
- Nie stosować jako gąbki chirurgicznej w silnie krwawiących ranach.

Ostrzeżenia

- Ze względu na nieokluzyjny charakter tego opatrunku, UrgoClean ROPE można stosować na zakażone rany pod ścisłą kontrolą lekarską.
- W trakcie procesu oczyszczania rany z tkanek martwiczych rana może wydawać się większa. Dzieje się tak z powodu ciągłego usuwania tkanek martwiczych.
- Należy ograniczyć stosowanie miernika w ranie; nie wolno pozostawiać miernika w ranie.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy opakowanie zapewniające sterylność nie zostało uszkodzone. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie zjadać; przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Nie sterylizować ponownie taśmy ani miernika.
- Opakowanie pojedyncze, sterylne, przeznaczone do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove