

UrgoTul Absorb Border, opatrunek, 10 cm x 10 cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)

Cena: 13,99 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UrgoTul Absorb Border to samoprzylepny opatrunek piankowy, który wykorzystuje technologię TLC (lipidowo-koloidową). Dzięki temu zapewnia optymalne warunki gojenia, minimalizując ból podczas zmiany opatrunku i chroniąc delikatne tkanki.

Przeznaczenie

UrgoTul Absorb Border jest przeznaczony do leczenia ran z umiarkowanym i dużym wysiękiem, takich jak:

- owrzodzenia żyłne i tętnicze,
- odleżyny,
- oparzenia II stopnia,
- rany chirurgiczne,
- rany pourazowe.

Sposób użycia

- Przygotowanie rany
- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem.
- Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb Border.
- Ostrożnie osuszyć otaczającą skórę.
- Nakładanie opatrunku
- Zdjąć ochronne skrzydełka.
- Nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb Border (samoprzylepny brzeg silikonowy powinien znajdować się co najmniej 1 cm od rany).
- Wygładzić opatrunek na ranie.

- Zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone.
- Nakładanie odmiany krzyżowej opatrunku
- Umieścić opatrunek tak, aby jego koniec był skierowany w stronę obszaru krzyżowego.
- Zdejmowanie opatrunku
- Ucisnąć zdrową skórę, unieść róg opatrunku i ostrożnie go odkleić.
- Zmiana opatrunku
- Opatrunek UrgoTul Absorb Border można zmieniać co 2 do 4 dni, ale nie rzadziej niż co 7 dni w zależności od ilości wysięku i stanu rany.

Właściwości

Warstwa kontaktowa TLC zastosowana w opatrunku wspiera naturalny proces gojenia rany i zapobiega przywieraniu opatrunku do jej łożyska. Wielowarstwowa struktura umożliwia skuteczne wchłanianie wysięku, zapewniając suchą powierzchnię wokół rany. Dzięki samoprzylepnemu brzegowi opatrunek łatwo się aplikuje i pozostaje na swoim miejscu, co zwiększa komfort pacjenta i ułatwia jego stosowanie. Opatrunek UrgoTul Absorb Border zapobiega wtórnemu zakażeniu rany, co przyspiesza proces gojenia. Dzięki hypoalergicznym właściwościom minimalizuje ryzyko podrażnień i alergii.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie należy przecinać środkowej części opatrunku, która zawiera silnie chłonną warstwę. Natomiast w razie potrzeby można przyciąć samoprzylepne brzegi nożyczkami, tak aby opatrunek pasował do kształtu rany.
- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej.
- Należy usunąć nadmierne owłosienie, obcinając włosy blisko skóry, aby zapewnić dobry kontakt opatrunku ze skórą.
- W przypadku równoczesnego stosowania opatrunku z kremem, emulsją, należy pozwolić na wyschnięcie skóry przed zastosowaniem opatrunku.
- Opatrunku UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove