

UrgoTul Absorb, opatrunek, 15 cm x 20 cm, 1 szt. (z opakowania 10 sztuk)



Cena: 38,04 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odleżyny, Oparzenie, Owrzodzenia, Rana
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

UrgoTul Absorb to medyczny opatrunek lipidowo-koloidowy z pianką. Produkt zawiera miękką, przylegającą warstwę TLC wykonaną z polimerów i cząstek hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy), które łączą się z chłonną wkładką z pianki poliuretanowej po zetknięciu się z raną. Dodatkowo, opatrunek posiada ochronne, włókninowe podłoże poliuretanowe.

Wskazania

UrgoTul Absorb jest wskazany we wszystkich:

- przewlekłych ranach z wysiękiem (owrzodzeniach kończyn dolnych, odleżynach, owrzodzeniach stopy cukrzycowej),
- ostrych ranach (oparzeniach 2 stopnia, otarciach skóry, ranach pourazowych, ranach pooperacyjnych),
- w miejscowym leczeniu ran grzybiczych w skojarzeniu z leczeniem przeciugrzybiczym.

Sposób użycia

1. Przygotowanie rany:

- Oczyszczyć ranę zgodnie z miejscowym protokołem, a następnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, ostrożnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Absorb.
- Ostrożnie osuszyć otaczającą skórę.

2. Nakładanie opatrunku:

- W razie potrzeby opatrunki UrgoTul Absorb można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany.
- Zdjąć ochronne skrzydełka.
- Nałożyć na ranę miękką, przylegającą stroną opatrunku UrgoTul Absorb.

- Zabezpieczyć opatrunek odpowiednim bandażem.
- Zabandażować opatrunek bandażem uciskowym, o ile zostało to zalecone.

3. Zmiana opatrunku:

- Opatrunki UrgoTul Absorb należy zmieniać co 2 do 4 dni w zależności od objętości wysięku i stanu klinicznego rany.
- O ile zalecono stosowanie opatrunków UrgoTul Absorb wraz z bandażem w żylnych owrzodzeniach kończyn dolnych, opatrunki można pozostawić na maksymalnie 7 dni w zależności od stanu rany i lokalnego protokołu.

Właściwości

Wyrób medyczny UrgoTul Absorb po zetknięciu się z wysiękiem z rany tworzy żel lipidowo-koloidowy. Stwarza tym samym wilgotne środowisko, które sprzyja gojeniu. Opatrunek zapewnia bezurazowe zdejmowanie bez uszkodzania nowo powstałej tkanki ziarninowej, przez co jest bezbolesny podczas zmiany opatrunku. Chłonna wkładka zawierająca piankę poliuretanową zapewnia drenaż wysięku, chroniąc skórę wokół rany przed maceracją. Podłoże jest miękkie, plastyczne i bardzo wygodne: umożliwia dobre dopasowanie opatrunku do kształtu rany.

Ostrzeżenia

- Przed zastosowaniem należy zapoznać się z treścią instrukcji używania lub etykietą.
- Nie stosować w przypadku uczulenia na którykolwiek ze składników wyrobu.
- W przypadku wątpliwości należy skonsultować się z lekarzem.
- Przechowywać w temperaturze pokojowej. Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- W razie stwierdzenia objawów klinicznych miejscowego zakażenia, można zmienić opatrunek na opatrunek przeciwbakteryjny Urgo, w zależności od oceny klinicznej.
- Opatrunku UrgoTul Absorb Border nie wolno stosować w komorze hiperbarycznej.
- Sterylne opakowanie jednostkowe do jednorazowego użytku: powtórne użycie opatrunku do jednorazowego użytku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.
- Miękka, przylegająca warstwa TLC opatrunku UrgoTul Absorb przylega do rękawic chirurgicznych (lateksowych). Z tego powodu zaleca się unikanie kontaktu z miękką, przylegającą warstwą TLC.

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove