

UrgoTul Ag Silver, opatrunek, 10cm x 12cm, 1 sztuka (z opakowania 10 sztuk)

Cena: 27,82 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	LABORATORIA POLFA ŁÓDŹ SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

UrgoTul Ag/Silver to medyczny opatrunek z lipidowo-koloidową warstwą kontaktową impregnowaną solami srebra. Produkt dostępny jest w rozmiarze 10x12 cm i sprzedawany w opakowaniach zawierających 10 sztuk, z możliwością zakupu pojedynczych opatrunków.

Wskazania

Opatrunek UrgoTul Ag/Silver jest wskazany do miejscowego leczenia ran z miejscowym zapaleniem lub zagrożonych miejscowym zapaleniem: ran przewlekłych (odleżyn i owrzodzeń kończyn dolnych) i ran ostrych (oparzeń o częściowej grubości, otarć skóry, ran pourazowych, ran chirurgicznych, itp.).

Ze względu na brak właściwości samoprzylepnych, opatrunek UrgoTul Ag/Silver jest zalecany w leczeniu ran, w których otaczająca skóra jest osłabiona.

Działanie

Wyrób medyczny UrgoTul Ag/Silver jest opatrunkiem niesamoprzylepnym i nieokluzyjnym, który nie przywiera do rany.

- Po zetknięciu się z wysiękiem z rany, cząstki hydrokoloidu (CMC) tworzą żel i łączą się z matrycą, tworząc cienką warstwę lipidowo-koloidową.
- Opatrunek ma szczególne właściwości:
- Utrzymuje wilgotne środowisko, sprzyjające gojeniu rany.
- Tworzy żel po zetknięciu się z raną.
- Zdjęcie opatrunku nie prowadzi do uszkodzenia nowopowstałej tkanki.
- Bezbolesna zmiana opatrunku.
- Ochrona otaczającej skóry.
- Dodatkowo jony Ag+ matrycy gojącej ze srebrem (TLC-Ag) nadają opatrunkowi UrgoTul Ag/Silver działanie przeciwbakteryjne, które może zmniejszać miejscową ilość bakterii.
- Srebro ma działanie przeciwbakteryjne o szerokim spektrum, obejmujące bakterie Gram ujemne i Gram dodatnie oraz niektóre

pleśnie i drożdże. Jest szczególnie skuteczne wobec *Staphylococcus aureus*, MRSA, *Streptococcus pyogenes* i *Pseudomonas aeruginosa* (pałeczka ropy błękitnej), które są najczęściej odpowiedzialne za zakażenia ran.

- Opatrunek wykazuje działanie przeciwbakteryjne przez okres do 7 dni. Działanie przeciwbakteryjne opatrunku także przyczynia się do zmniejszenia nieprzyjemnego zapachu.

Skład

Opatrunek zawiera matrycę gojącą ze srebrem, wykonaną z siateczki poliestrowej impregnowanej cząstkami hydrokoloidu (karboksymetylocelulozy), wazeliny, polimerów kohezyjnych i soli srebra.

Sposób użycia

- Oczyszczyć ranę roztworem soli fizjologicznej. Jeśli wcześniej stosowano antyseptyk, dokładnie przepłukać ranę roztworem soli fizjologicznej przed nałożeniem opatrunku UrgoTul Ag/Silver.
- W razie potrzeby, opatrunek UrgoTul Ag/Silver można przyciąć jałowymi nożyczkami, dostosowując wielkość opatrunku do wielkości rany.
- Zdjąć z opatrunku ochronne skrzydełka.
- Nałożyć opatrunek UrgoTul Ag/Silver bezpośrednio na ranę.
- Przykryć opatrunek UrgoTul Ag/Silver drugim opatrunkiem (sterylną wkładką odpowiednią do pochłaniania wysięku, zabezpieczoną bandażem).
- W razie potrzeby założyć bandaż uciskowy.
- Opatrunek UrgoTul Ag/Silver można zmieniać co 1 do 3 dni w zależności od leczonej rany i przebiegu gojenia.
- Czas trwania kuracji UrgoTul Ag/Silver nie powinien przekroczyć jednego miesiąca.

Ostrzeżenia

- Leczenie opatrunkiem UrgoTul Ag/Silver należy prowadzić pod kontrolą lekarską.
- Zastosowanie opatrunku nie wyklucza potrzeby wprowadzenia odpowiedniego ogólnego leczenia przeciwbakteryjnego zainfekowanej rany, zgodnie z lokalnie przyjętymi standardami
- Opatrunek UrgoTul Ag/Silver może przywierać do rękawic chirurgicznych (lateksowych). Z tego powodu zaleca się zwilżenie rękawic roztworem soli fizjologicznej, aby ułatwić trzymanie opatrunku.
- Nie zaleca się równoczesnego stosowania z innymi miejscowymi terapiami.
- Nie stosować u kobiet ciężarnych ani karmiących piersią, noworodków i wcześniaków ze względu na brak danych w tych grupach pacjentów.
- Lekarze i pracownicy ochrony zdrowia powinni wiedzieć, że istnieją bardzo ograniczone dane dotyczące długotrwałego i wielokrotnego stosowania opatrunków zawierających srebro, w szczególności u dzieci i noworodków.
- Unikać kontaktu z elektrodami i żelami przewodzącymi w trakcie pomiarów elektronicznych, np. EEG i EKG.
- Nie stosować w komorze hiperbarycznej.
- Opatrunek jednorazowy, dla jednego pacjenta, sterylny: powtórne użycie opatrunku może wiązać się z ryzykiem zakażenia.
- Przed użyciem należy sprawdzić, czy sterylna torebka ochronna nie została uszkodzona. Nie stosować opatrunku w przypadku uszkodzenia opakowania.
- Nie sterylizować powtórnie opatrunku.
- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na srebro i inne składniki opatrunku.
- Nie stosować u pacjentów poddawanych obrazowaniu metodą rezonansu magnetycznego (MRI).

Producent

URGO LABORATOIRES
42 rue de Longvic, Francja
Chenove