

Vacutest, próżniowy zestaw sterylny do pobierania próbki moczu

Cena: 7,02 zł



Opis słownikowy

Opakowanie	1 sztuka
Postać	pojemnik
Producent	EL-COMP CEZARY KOSTUCH
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych

Opis produktu

Opis

Próżniowy zestaw do pobierania próbki moczu **Vacurette** to jednorazowy wyrób medyczny przeznaczony do diagnostyki in vitro. W skład zestawu wchodzi sterylny pojemnik o pojemności 120 ml, sterylna probówka o pojemności 9 ml oraz instrukcja użycia. Umożliwia on próżniowe przeniesienie próbki moczu z większego pojemnika do probówki, która następnie jest przekazywana do laboratorium. Wszystkie elementy zestawu są produkowane na terenie Unii Europejskiej.

Zastosowanie

Do próżniowego pobierania próbki moczu.

Sposób użycia

- Przystępując do pobrania próbki moczu, umyj dokładnie ręce i miejsca intymne.
- Załóż rękawiczki jednorazowe.
- W pojemniku o pojemności 120 ml odkręć wieczko, przekręcając je w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
- Wieczko połóż na czystej powierzchni, górną częścią do dołu. Nie dotykaj wewnętrznej powierzchni pojemnika i nakrętki.
- Napełnij pojemnik do maksymalnie 3/4 jego pojemności i szczelnie zakręć.
- Przed pobraniem moczu do probówki, delikatnie potrząśnij pojemnik z moczem.
- Następnie unieść częściowo folię ochronną z wieczka (nie zdejmuj jej całkowicie). Nie wkładaj palca do otworu w wieczku, ponieważ wewnątrz znajduje się igła.
- Włóż probówkę i delikatnie naciśnij. Probówka musi pozostać zanurzona do momentu, aż się napełni (ustanie przepływ).
- Wyjmij probówkę i delikatnie nią potrząśnij.
- Na wieczku większego pojemnika ponownie przyklej folię ochronną.
- Do laboratorium zanieś jedynie probówkę.

Ostrzeżenia



Pojemnik 120 ml zawiera wkład z igłą. Nie wolno wkładać palca do otworu w wieczku.

Ważne wskazówki

- Podczas pobierania próbki moczu nie wolno dotykać wewnętrznej powierzchni pojemnika o pojemności 120 ml i jego nakrętki.
- Zużyty pojemnik należy usunąć jak inny odpad domowy.

Producent

EL-COMP
ul. Warszawska 11
82-300 Elbląg