

Veroval compact, ciśnieniomierz, naramienny, 1 sztuka

Cena: 146,16 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	ciśnieniomierz
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Veroval Compact to automatyczny ciśnieniomierz naramienny, zaprojektowany z myślą o łatwej i intuicyjnej obsłudze. Urządzenie oferuje funkcję wykrywania zaburzeń rytmu serca oraz kontrolę poprawnego założenia mankietu, co zwiększa dokładność pomiaru. Wyposażony jest w duży, przejrzysty wyświetlacz, który nie tylko pokazuje wyniki pomiaru, ale również informuje o aktualnej dacie i godzinie.

Działanie

Veroval compact, ciśnieniomierz naramienny:

- W pełni automatyczny i łatwy w użyciu,
- Wykrywa i informuje o arytmii serca,
- Duży wyświetlacz ułatwiający odczyt zmierzonych wartości,
- Kontrola prawidłowo założonego mankietu,
- Prosta analiza zmierzonych wartości za pomocą systemu sygnalizacji kolorowych wskaźników,
- 2 x 100 miejsc w pamięci,
- Długookresowa 3-letnia gwarancja,
- Zawiera torbę do przechowywania i baterie 4x 1,5 V AA.

Sposób użycia

Ciśnieniomierz Veroval compact należy używać ściśle według zaleceń zawartych w instrukcji obsługi. Przed wykonaniem pomiaru należy dokładnie przeczytać instrukcję obsługi, która znajduje się w opakowaniu. Prawidłowe wykonanie pomiaru ciśnienia tętniczego jest możliwe wyłącznie przy odpowiednim zastosowaniu urządzenia. Instrukcja ta ma na celu dokładny opis poszczególnych etapów pomiaru ciśnienia tętniczego za pomocą ciśnieniomierza naramiennego Veroval compact. Opis zawiera ważne i pomocne wskazówki, dzięki którym każdy użytkownik urządzenia otrzyma rzetelny osobisty profil ciśnienia tętniczego. Należy używać urządzenia zgodnie z informacjami podanymi w instrukcji obsługi. Instrukcję obsługi należy starannie przechowywać i udostępniać innym użytkownikom. Należy sprawdzić, czy opakowanie nie nosi oznak uszkodzenia, a zawartość jest kompletna.

Ostrzeżenia

Osoby z powyższymi problemami powinny skonsultować się z lekarzem i ustalić, czy samodzielne pomiary ciśnienia są dla nich odpowiednim rozwiązaniem:

- W przypadku ciąży. W okresie ciąży ciśnienie tętnicze może ulec zmianie. Regularna kontrola jest szczególnie ważna przy podwyższonym ciśnieniu, ponieważ w określonych przypadkach może ono wpływać na rozwój płodu. W każdym razie należy skonsultować się z lekarzem, zwłaszcza w przypadku stanu przedrzucawkowego, i ustalić, czy i kiedy dokonywać pomiaru ciśnienia we własnym zakresie.
- W przypadku cukrzycy, zaburzeń czynności wątroby lub zwężenia naczyń krwionośnych (np. miażdżycy tętnic, miażdżycy zarostowa tętnic obwodowych): w tych przypadkach mogą wystąpić nieprawidłowe wartości pomiaru,
- Określonych schorzeń krwi (np. hemofilii) lub ciężkie zaburzeń krążenia,
- Przyjmowania leków rozrzedzających krew,
- Posiadania wszczepionego rozrusznika serca: w tym przypadku mogą wystąpić nieprawidłowe wartości pomiarów. Sam ciśnieniomierz nie ma żadnego wpływu na pracę stymulatora. Należy pamiętać, że wyświetlana wartość tętna nie służy do kontroli częstotliwości stymulatorów serca,
- Przy skłonności do krwaków i/lub wrażliwości na ból uciskowy,
- Poważnych zaburzeń rytmu serca lub arytmii. Ze względu na oscylometryczną metodę pomiaru może zdarzyć się w niektórych przypadkach, że zostaną uzyskane błędne wyniki pomiaru lub nie zostanie wyświetlony wynik. Ciężkie zaburzenia rytmu pracy serca mogą doprowadzić w określonych przypadkach do błędnych pomiarów lub wpłynąć na ich dokładność.
- Ustalone samodzielnie wartości pomiarów mogą służyć jedynie do własnej informacji — nie zastępują one badania lekarskiego!
- Należy omówić wartości pomiarów z lekarzem, ale nie wolno dokonywać na tej podstawie własnych decyzji medycznych (np. co do rodzaju i dawek przyjmowanych leków)! Pomiar ciśnienia tętniczego we własnym zakresie nie jest równoznaczny z terapią!
- Nie należy samodzielnie rozpoczynać procesu leczenia, opierając się na własnej ocenie wartości pomiarów.
- Pomiary należy dokonywać zgodnie ze wskazaniem lekarza i w oparciu o jego diagnozę.
- Należy również przyjmować leki zalecone przez specjalistę i nie zmieniać samodzielnie ich dawki!
- Należy ustalić z lekarzem odpowiednią porę na wykonywanie pomiaru ciśnienia tętniczego.

Producent

Globalcare Medical Technology Co., Ltd
7th Building, 39 Middle Industrial Main Road, European Industrial Zone, Xiaolan Town
528425 Zhongshan City, Guangdong Province, PRC