

Viscoplast Opti-Plast Junior Dekorowane plastry okulistyczne 62 mm x 50 mm 10 sztuk



Cena: 27,07 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VISCOPLAST
Opakowanie	10 sztuk
Postać	plaster
Producent	3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Plastry okulistyczne **Viscoplast Opti-plast Junior** to specjalnie zaprojektowane plastry dla dzieci, przeznaczone do terapii niedowidzenia (zwanej również leniwym okiem) oraz leczenia zeza, zgodnie z zaleceniami lekarza. Dzięki swojej cienkości mogą być noszone pod okularami korekcyjnymi, zapewniając skuteczną terapię. Wykonane z przepuszczającego powietrze materiału włóknistego, pozwalają skórze oddychać, zapewniając komfort przez cały dzień. Elastyczna struktura opatrunku umożliwi swobodny ruch powiek. Opakowanie zawiera 4 różne wzory graficzne, które sprawiają, że plastry są atrakcyjne dla dzieci, co zachęca je do ich noszenia.

Zastosowanie

Plastry okulistyczne dla dzieci do terapii okluzyjnej w leczeniu amblyopii.

Sposób użycia

- Skórę wokół oka umyj i osusz.
- Usuń papier zabezpieczający plaster.
- Lekko przymknij oczy, uważając, by nie napinać mięśni. Nie zaciskaj oczu.
- Przyłóż opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa.
- Przyklejaj od strony nosa w kierunku brwi. Nie naciągaj plastra ani skóry oka.
- Po przyklejeniu plastra lekko dociśnij palcem część przylepną wokół oka.
- Przy zdejmowaniu plastra delikatnie odklejaj go od strony nosa w kierunku ucha, jednocześnie przytrzymując skórę w wewnętrznej okolicy oka (bliżej nosa).

Ważne wskazówki

- Należy przestrzegać zaleceń lekarza okulisty, związanych z użytkowaniem opatrunku.
- W przypadku wystąpienia jakichkolwiek reakcji skórnych, należy natychmiast zaprzestać stosowania plastra i skonsultować się



z lekarzem.

- U pacjentów z wrażliwą skórą zaleca się stosowanie produktu z klejem silikonowym.
- Ponowne użycie produktu może doprowadzić do dezintegracji produktu lub jego wadliwego działania.
- Tylko do użytku na niezranioną skórę.
- To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Dodatkowe informacje

W opakowaniu znajduje się 10 dekorowanych plastrów okulistycznych Viscoplast o wymiarach 52 x 62 mm.

Producent

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany