

Viscoplast Opti-Plast Plastry okulistyczne 82 mm x 57 mm 10 sztuk



Cena: 30,68 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Plasre
Producent	3M POLAND MANUFACTURING SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

Opis produktu

Opis

Viscoplast Opti-Plast to hipoalergiczny produkt medyczny przeznaczony do terapii okluzyjnej oczu, który należy stosować zgodnie z zaleceniami lekarza.

Zastosowanie

Viscoplast Opti-Plast plastry okulistyczne stosuje się w terapii okluzyjnej oczu (np. w leczeniu zezu).

Sposób użycia

- Usunąć papier zabezpieczający plaster Viscoplast Opti-Plast.
- Lekko przymknij oko, ale nie napinaj mięśni ani nie zaciskaj oka.
- Przyłóż opatrunek centralnie na oko, węższą stroną do nosa.
- Rozpocznij przyklejanie od strony nosa w kierunku brwi, starając się nie naciągać plastra ani skóry wokół oka.
- Po umieszczeniu plastra Viscoplast raz jeszcze delikatnie przyłóż palec do części przylepionych wokół oka.

Właściwości

Wymiary: 82 mm x 57 mm

Ważne wskazówki

- Przechowywać w temperaturze pokojowej.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- U pacjentów z wrażliwą skórą zaleca się stosowanie produktu z klejem silikonowym.

Dodatkowe informacje

- plastry w cielestym kolorze,
- delikatne dla skóry,
- cienkie, można je nosić pod okularami,
- chłonne i nie przyklejają się do ran,
- przepuszczające powietrze.

Producent

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss
Germany

Galeria

