

Viscoplast Prestovis Plus, plaster do cięcia, bardzo mocny, biały, 1 m x 6 cm, 1 sztuka

Cena: 10,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VISCOPLAST
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Plastry
Producent	3M POLAND SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny, Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Plaster do cięcia **Viscoplast Prestovis Plus** Bardzo Mocny to wyrób medyczny umożliwiający dopasowanie długości opatrunku do wielkości rany. Wykonany z miękkiej, lecz jednocześnie trwałej i elastycznej tkaniny, plaster dobrze przylega do skóry, nawet na łokciach i kolanach.

Plaster Viscoplast Prestovis Plus Bardzo Mocny charakteryzuje się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu nie ulega rozerwaniu pod wpływem naprężenia. Jego oddychająca struktura wspomaga naturalne procesy gojenia, a opatrunek nie przywiera do rany, co ułatwia usuwanie bez uszkodzania gojącej się skóry.

Plaster Bardzo Mocny Viscoplast Pierwsza Pomoc nie zawiera lateksu, skutecznie chroni ranę przed uszkodzeniami oraz brudem. Jest uniwersalny, biały i idealny do stosowania w apteczce domowej oraz podróżnej, odpowiedni dla całej rodziny.

Zastosowanie

Viscoplast Pierwsza Pomoc Bardzo Mocny tkaninowy plaster z opatrunkiem pozwala odpowiednio zabezpieczyć ranę przed brudem i uszkodzeniami.

Sposób użycia

- Oczyszczyć i osuszyć zranioną skórę.
- Wyjąć plaster z opakowania i dotknąć do wielkości dostosowanej do zaopatrywanego miejsca.
- Nakleć plaster na skórę, tak, aby opatrunek był umieszczony bezpośrednio na ranie, a następnie dociśnij palcem po obwodzie.
- Zdejmij plaster, ciągnąc go za jeden z brzegów równoległe do skóry.
- Wymieniać plaster w zależności od indywidualnych potrzeb.

Właściwości

- Rozmiar: 6 cm x 1 m,
- Kolor biały,
- Oddychające,
- Bez lateksu,
- Chłonny opatrunek, który nie przykleja się do skóry.

Ostrzeżenia

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

Ważne wskazówki

- Przechowywać w temperaturze pokojowej, w sposób niedostępny dla dzieci.
- Chronić od światła i wilgoci.
- Tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać ponownie.
- Plaster z opatrunkiem jest wyrobem medycznym jednorazowego użytku.

Producent

3M Deutschland GmbH
Health Care Business
Carl-Schurz-Str. 1
41453 Neuss, Niemcy

Galeria

