

Viscoplast Steri-Strip Paski do zamykania ran cieliste 6 mm x 75 mm 6 sztuk



Cena: 13,50 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VISCOPLAST
Opakowanie	6 sztuk
Postać	Plastry
Producent	3M DEUTSCHLAND GMBH
Przeznaczenie	Rana, Skaleczenie
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Paski do zamykania ran **Steri-Strip 6 sztuk Viscoplast** zostały stworzone z myślą o zabezpieczeniu i zamykaniu ran o różnej długości. W wielu sytuacjach eliminują konieczność używania szwów, co dodatkowo zmniejsza ryzyko powstawania blizn, zapewniając estetyczny efekt. Dzięki łatwej i szybkiej aplikacji, paski te mogą być używane samodzielnie, nawet w warunkach domowych.

Zastosowanie

- Zabezpieczanie, zamykanie i wspieranie gojenia małych cięć chirurgicznych, płytkich ran oraz drobnych skaleczeń.
- Zabezpieczenie przed rozejściem się szwów.

Sposób użycia

- Umyć i osuszyć skórę w miejscu planowania naklejenia pasków. Usunąć nadmiar włosów.
- Listek zgiąć wzdłuż perforowanej linii i oderwać krawędź.
- Zbliżyć starannie do siebie oba brzozy rany i rozpoczynając od środka, umieścić pierwszy pasek prostopadle do rany. Unikać naprężania podczas przyklejania.
- Zastosować kilka pasków w niewielkich odstępach (około 3 mm) od siebie.
- Dodatkowe paski można zastosować równolegle do rany około 12 mm od końca pasków tak, aby zwiększyć przyczepność.
- W celu usunięcia paska należy ostrożnie ściągnąć oba końce w kierunku miejsca cięcia.

Przeciwwskazania

- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.

- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie używaj kiedy nie można uzyskać dobrej przyczepności z powodu obecności płynu z rany, natłuszczenia skóry, wilgoci lub włosów.
- Nie stosować na rany klute, zanieczyszczone lub zakażone. Skonsultuj się z lekarzem, jeśli zauważysz którykolwiek z tych objawów infekcji: gorączka, ból, obrzęk, swędzenie, wysypka lub pieczenie.
- Nie stosować w przypadku ran o wysokim napięciu skóry, których nie można przytrzymać palcami.
- Nie używać jako elementu mocującego, np. do utrzymywania rurki na miejscu.
- Aby zmniejszyć ryzyko infekcji, nie używaj ponownie pasków.

Ostrzeżenia

- Podobnie jak w przypadku wszystkich produktów przylepnych nakładanych na skórę, u niewielkiego odsetka osób może wystąpić podrażnienie skóry, odbarwienie lub zranienie podczas noszenia lub po zdjęciu.
- Napięcie spowodowane obrzękiem pooperacyjnym, ruchem ciała / stawu lub zamykaniem skóry pod napięciem może powodować obrażenia skóry, w tym pęcherze lub utratę przyczepności.
- Stosowanie z dodatkowymi produktami klejącymi może powodować pęcherze lub obrażenia skóry.
- Jeśli rana jest głęboka i stale krwawi, należy natychmiast zgłosić się do lekarza.

Dodatkowe informacje

Paski Steri-Strip Viscoplast 6 sztuk o wymiarach 6 x 75 mm, kolor cielisty.

Producent

3M Company
2510 Conway Avenue
St. Paul
MN 55144
USA

Galeria

