

Vizik Alergia Zaczerwienione, suche i swędzące oczy, krople do oczu, 10 ml

Cena: 50,84 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VIZIK
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające, Ochronne, Regenerujące (odbudowujące)
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vizik Alergia to wyrób medyczny w formie kropli do oczu, przeznaczony do nawilżania, łagodzenia podrażnień i ochrony oczu. Produkt nie zawiera konserwantów.

Składniki

1 ml wyrobu zawiera: hialuronian sodu 0,15%, ektoinę 2%, chlorek sodu, cytrynian sodu, kwas cytrynowy, wodę do wstrzykiwań.

Zastosowanie

Krople do oczu odpowiednie do stosowania w celu nawilżenia i pielęgnacji zaczerwienionych, suchych i swędzących oczu oraz ochrony oczu przed alergenami.

Sposób użycia

- Otwórz buteleczkę z kroplami. W tym celu usuń pierścień zabezpieczający, pociągając za jego wystającą część, po czym zdejmij korek, pociągając do góry.
- Odchyl głowę nieco do tyłu, skieruj wzrok do góry i delikatnie odciągnij dolną powiekę oka.
- Trzymając butelkę otworem skierowanym do dołu, mocno ściśnij ją przez dłuższą chwilę, aby uwolnić kroplę. Unikaj kontaktu końcówki zakraplacza z oczami lub dłońmi, aby zachować sterylność wyrobu.
- Stosuj po 1 kropli do każdego worka spojówkowego 3-5 razy dziennie.
- Powoli zamknij oczy, aby równomierne rozprowadzić krople na powierzchni oka.
- Usuń pozostającą na otworze kroplę, lekko stukając w dno jeszcze przechylonej butelki.
- Zamknij butelkę, delikatnie przyciskając nakrętkę do otworu.



Przeciwwskazania

Kropli do oczu Vizik Alergia nie należy stosować w przypadku:

- nadwrażliwości na którykolwiek ze składników;
- infekcji lub uszkodzenia rogówki.

Ostrzeżenia

- Przed użyciem zapoznaj się z treścią instrukcji używania i etykietą bądź skonsultuj się z lekarzem, gdyż ten wyrób medyczny może nie być odpowiedni dla Ciebie.
- Nie używać preparatu w przypadku uszkodzenia butelki lub pierścienia zabezpieczającego korek.
- Nie dotykać oczu kroplomierzem.

Ważne wskazówki

- Jeżeli w wyniku stosowania kropli nastąpi pogorszenie objawów lub nie nastąpi poprawa, należy poradzić się z lekarza okulisty.
- W bardzo rzadkich przypadkach zastosowanie kropli może spowodować podrażnienie bardzo wrażliwych oczu.
- W przypadku stosowania soczewek kontaktowych należy zdjąć je przed aplikacją, a następnie odczekać co najmniej 15 minut przed ponownym założeniem.
- W przypadku stosowania innych kropli/maści do oczu należy odczekać około 15 minut. Krople Vizik Alergia należy stosować zawsze jako ostatnie.
- Po aplikacji może wystąpić chwilowe niewyraźne widzenie. W takim przypadku nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn do czasu powrotu normalnego widzenia.
- Nie stosować kropli do oczu po upływie terminu ważności zamieszczonego na pojemniku wielodawkowym i opakowaniu zewnętrznym.
- Specjalny system sterylnych filtrów kroplomierza wymaga, aby każdorazowo po zakropleniu, odczekać kilka sekund nie naciskając na butelkę, celem umożliwienia powrotu powietrza do jej wnętrza. Niewykonanie tej czynności może spowodować, że dalsze aplikacje kropli będą utrudnione. Dodatkowo konieczne będzie stosowanie coraz mocniejszego ucisku butelki celem odmierzenia kolejnych kropli.
- Ze względu na specjalny, innowacyjny system filtrów zakraplacza w butelce zawsze pozostaje minimalna ilość roztworu.
- Po użyciu zamknąć butelkę korkiem.
- Przechowywać w temperaturze od 2-25°C. Nie zamrażać. Chronić przed światłem, przechowując butelkę w oryginalnym opakowaniu.
- Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

Penta Arzneimittel GmbH
Werkstrasse 3
92551 Stulln, Niemcy