

Vizik krople na zmęczone i suche oczy, 10 ml

Cena: 39,48 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	VIZIK
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople
Producent	N.P.ZDROVIT SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające, Oslaniające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Vizik to wyrób medyczny w formie kropli, które łagodzą objawy zmęczonych i suchych oczu, tworząc sterylną, przezroczystą warstwę ochronną na powierzchni oka.

Wskazania

Produkt wskazany dla osób z problemem suchych i zmęczonych oczu. Krople mogą być także stosowane przez osoby noszące soczewki kontaktowe (nie ma potrzeby ich zdejmowania przed aplikacją produktu).

Działanie

Vizik krople na zmęczone i suche oczy działa nawilżająco na powierzchnię oka, oraz chroni ją przed dyskomfortem wywołanym przez czynniki mechaniczne (np. powstałe podczas noszenia soczewek kontaktowych lub badań okulistycznych), drażniące czynniki środowiskowe (np. wiatr, chłód, suche lub zanieczyszczone powietrze, klimatyzacja), zmęczenie oczu wywołane długotrwałym wyczerpaniem wzroku (np. podczas pracy z komputerem, mikroskopem, długiej eksploatacji pojazdów silnikowych).

Skład

- Kwas hialuronowy w postaci hialuronainu sodu, karbomer 981, gliceryna, woda wysokooczyszczona.
- Kwas hialuronowy - substancja nawilżająca występująca naturalnie w ludzkim oku oraz w filmie łzowym. Chroni przed nadmierną suchością.
- Karbomer - działa osłaniająco na rogówkę, przeciwdziała podrażnieniom spojówki oraz łagodzi podrażnienia związane z niedostatecznym wydzielaniem łez.

Stosowanie

Należy zakraplać 1 kroplę wyroby medycznego Vizik do worka spojówkowego 3-5 razy dziennie.

Sposób użycia



1. Zdjąć korek
2. Odchylić głowę do tyłu, spojrzeć w górę i delikatnie pociągnąć dolną powiekę oka w dół
3. Ściskając buteleczkę wkropić 1 kroplę do każdego oka.
4. Powoli zamknąć oko w celu równomiernego rozprowadzenia produktu na jego powierzchni.
5. Zamknąć buteleczkę korkiem

Przeciwwskazania

- Nie należy używać preparatu w przypadku uszkodzenia butelki.
- Nie należy dotykać kroplomierzem oczy. Nie należy dotykać dłońmi kroplomierza.
- Nie stosować w przypadku alergii na którykolwiek ze składników preparatu.
- Nie stosować w przypadku uszkodzenia lub infekcji rogówki.
- Nie stosować kropli po upływie terminu ważności umieszczonego na butelce.
- Nie stosować dłużej niż 12 miesięcy od otwarcia.

Ostrzeżenia

- Produkt należy przechowywać w temperaturze 2-25oC. Chronić przed mrozem.
- Chronić przed światłem.
- Produkt przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci.
- Należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem jeśli nie nastąpiła poprawa lub objawy się zaostrzyły.
- Bezpośrednio po aplikacji produktu może wystąpić chwilowe rozszerzenie źrenic i niewyraźne widzenie. Nie należy prowadzić pojazdów ani obsługiwać maszyn będących w ruchu aż do czasu powrotu normalnego widzenia.

Producent

Penta Arzneimittel GmbH
Werksstrasse 3
92551 Stulln, Niemcy