

# Wartix Środek do usuwania kurzajek 38 ml

Cena: 62,03 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	WARTIX
Opakowanie	38 ml
Postać	Aerozol
Producent	GENEXO SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Kurzajki
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży

## Opis produktu

### Opis

Wartościową i powszechnie uznaną metodą leczenia kurzajek jest krioterapia, znana również jako wymrażanie. Wartix to preparat wykorzystujący tę technikę, charakteryzujący się wysoką skutecznością, bezpieczeństwem i łatwością użycia. Płyn chłodzący jest bezpośrednio aplikowany na kurzajkę, co prowadzi do jej wymrożenia aż po rdzeń. Proces ten może skutkować zaczerwienieniem lub pojawieniem się pęcherzyków na skórze, co jest normalnym efektem. Zazwyczaj jednorazowe użycie Wartix wystarcza. Po 10-14 dniach od zastosowania, kurzajka odpada, pozostawiając zdrową, zregenerowaną warstwę naskórka.

### Działanie

Produkt kriochirurgiczny do leczenia kurzajek.

### Składniki

38ml dimetyloeter.

### Zastosowanie

Usuwanie kurzajek z dłoni i stóp.

### Sposób użycia

Zwrócić kurzajkę ku górze tak, aby zmieściła się w komorze aplikatora (skierowanego ku dołowi). Następnie przyłożyć aplikator tak, by krawędzie komory szczelnie przylegały do skóry wokół kurzajki. Trzykrotnie przycisnąć dozownik kciukiem, aby uwolnić płyn zamrażający. Przytrzymać aplikator na kurzajce przez co najmniej 10 sekund. Zdjąć aplikator z kurzajki. W tym momencie może wystąpić uczucie mrowienia lub niewielkiego bólu.

### Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.



- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.

#### Działania niepożądane

- Krwawienie
- Powstawanie pęcherzy
- Powstawanie blizn, gdy aplikacja będzie dłuższa niż zalecana

#### Producent

Royal Utermohlné  
De Overweg 1  
8471 ZA Wolvega, Holandia