

# Wellion SymPhar test paskowy 50 pasków

Cena: 36,63 zł



## Opis słownikowy

Dla kogo	Dla diabetyków, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	50 pasków
Postać	Test paskowy
Producent	SYMPHAR SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Diagnostyczne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

## Opis produktu

### Opis

Wellion SymPhar Paski testowe do oznaczania glukozy we krwi.

### Wskazania

- Paski testowe Wellion SymPhar są przeznaczone do badań zewnętrznych (do diagnostyki IN VITRO).
- Używać tylko z glukometrami Wellion Calla Light.
- Do samodzielnego stosowania.

### Sposób użycia

Pobranie próbki i przygotowanie

Świeża krew kapilarna z palca może być przechowana w jałowych kapilarkach lub rurkach EDTA. Taka próbka musi być wykorzystana w ciągu 15 minut. Nie należy dokonywać pomiarów z plazmy i osocza krwi. Nie należy używać środków konserwujących z zawartością fluoru.

Pomiar z alternatywnych miejsc

System Wellion CALLA Light potrafi mierzyć poziom cukru również z krwi pobranej z podstawy kciuka, jak i z przedramienia. U niektórych pacjentów występują fizjologiczne różnice pomiędzy krwią z opuszka palca a krwią z podstawy kciuka czy z przedramienia.

### Przeciwwskazania

- Nie wolno używać zarówno wilgotnych jak i uszkodzonych pasków testowych.
- Nie wolno używać już raz użytych pasków testowych.
- Nie wolno używać jako próbek plazmy ani surowicy krwi.
- Nie wolno robić pomiarów u noworodków.
- Nie wolno używać krwi tętniczej i żyłnej.



#### Uwagi

- Paski testowe należy przechowywać w temperaturze pomiędzy 8-30°C.
- Chronić przed słońcem, nie wolno zamrażać ani chłodzić.
- Paski testowe należy zużyć w ciągu 6 miesięcy po ich otwarciu.

#### Producent

Symphar Sp. z o.o.  
ul. Koszykowa 65  
00-667 Warszawa, Polska