

Zakraplacz do oczu 1 sztuka

Cena: 6,03 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	SANITY
Opakowanie	1 sztuka
Postać	-
Producent	ALBERT POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Akcesoria
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zakraplacz pełni funkcję przenoszenia, odmierzania i bezpiecznej aplikacji płynów do oka, ucha lub nosa.

Wskazania

Sanity Szklany zakraplacz przeznaczony jest do przenoszenia i odmierzania płynów oraz ich bezpiecznego aplikowania do w oka, ucha lub nosa. Wykonany jest ze szkła. Urządzenie jest higieniczne, pozwala aplikować dokładnie taką dawkę płynu na jakiej nam zależy

Sposób użycia

Przed pierwszym oraz każdym następnym użyciem obie części zakraplacza należy rozdzielić i zanurzyć w całości w gotującej się wodzie na kilka minut. Ściśnij ssawkę i zanurz końcówkę zakraplacza w przygotowanym płynie, a następnie zassij go poprzez zwolnienie nacisku. Aplikuj odpowiednią dawkę poprzez ściśnięcie balonika tak, aby ciecz wydawała się kroplami przez otwór na końcu rurki.

Ostrzeżenia

- Podczas zabiegu zachowaj bezpieczną odległość wyrobu od oka.
- Unikaj bezpośredniego kontaktu rąk z końcówką zakraplacza.
- Rodzaj zastosowanego roztworu/leku zawsze skonsultuj z lekarzem lub farmaceutą.
- Nie stosuj środków dezynfekujących.
- W razie uszkodzenia wyrobu należy go wyrzucić.
- Trzymaj w miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

ALBERT Polska Sp. z o. o
32-410 Dobczyce
Ul. Obwodowa 4A