

Zatoxin Rinse Zestaw do płukania nosa i zatok, 12 saszetek + irygator



Cena: 48,63 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	12 saszetek (+ irygator)
Postać	Proszek
Producent	TACTICA PHARMACEUTICALS SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Nawilżające, Oczyszczające, Udrażniające nos
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zatoxin Rinse to kompletne rozwiązanie w formie zestawu do płukania nosa i zatok. Umożliwia skuteczne oczyszczanie nosa oraz zatok przynosowych z zalegającej wydzieliny, alergenów i patogenów, jednocześnie nawilżając śluzówkę.

Wskazania

Wyrób medyczny stosuje się:

- w zapaleniu zatok przynosowych,
- w nieżycie nosa różnego pochodzenia,
- przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i zatok,
- profilaktycznie, w celu utrzymania prawidłowej higieny nosa i zatok.

Działanie

Zatoxin Rinse pozwala na dokładne oczyszczenie nosa i zatok z zalegającej wydzieliny, alergenów oraz patogenów, tym samym ograniczając gromadzenie się czynników, które mogą powodować infekcję. Dodatkowo wyrób nawilża suchą i podrażnioną błonę śluzową nosa i zatok, zmniejsza obrzęk błony śluzowej i uczucie ucisku w zatokach. Unikalna konstrukcja irygatora umożliwia płukanie nosa i zatok w łatwy i kontrolowany sposób – bez użycia dodatkowej siły i bez konieczności ściskania butelki.

Skład

Skład saszetki: chlorek sodu, dwuwęglan sodu.

Stosowanie

- W przypadku zapalenia zatok przynosowych, w nieżycie nosa różnego pochodzenia, przed i po zabiegach chirurgicznych nosa i

zatok oraz profilaktycznie, w celu zachowania higieny nosa i zatok: rozpuścić 1 saszetkę w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować izotoniczny roztwór do irygacji.

- W przypadku silnych objawów takich jak np. uciążliwe uczucie zatkanego nosa: rozpuścić 2 saszetki w 240 ml przegotowanej wody o temperaturze ciała, co pozwala przygotować hipertoniczny roztwór do irygacji.
- Płukanie nosa przeprowadzać 1-2 razy dziennie lub według wskazań lekarza, profilaktycznie stosować 2-3 razy w tygodniu.

Sposób użycia

- Otwórz torebkę zabezpieczającą i wyjmij wszystkie elementy butelki-irygatora.
- Przed rozpoczęciem korzystania z butelki-irygatora po raz pierwszy przepłukaj jego elementy pod bieżącą wodą.
- Wsyp zawartość 1 saszetki do butelki w celu przygotowania roztworu izotonicznego lub 2 saszetki w celu przygotowania roztworu hipertonicznego.
- Napełnij butelkę przegotowaną wodą (o temperaturze ciała ok. 36,6°C) do poziomu oznaczonego linią 240 ml.
- Dokładnie zakręć butelkę używając białej nakrętki i mieszaj roztwór przez potrząsanie butelką (zatkał palcem otwór dyszy) do całkowitego rozpuszczenia proszku w wodzie.
- Wybierz odpowiednią końcówkę dostosowaną do wieku użytkownika i typu irygacji jaką chcesz przeprowadzić (końcówka klasyczna - dla dorosłych, końcówka do łagodnej irygacji dla dzieci).
- Stań w pozycji lekko nachylonej nad umywalką, odwróć irygator do góry dnem i przyłóż końcówkę irygatora do otworu nosowego tak, aby uszczelnić otwór nosa. Pamiętaj, aby oddychać przez usta podczas płukania.
- Naciskaj palcem biały zawór na spodzie butelki, aby umożliwić jednostajny przepływ roztworu do płukania (120 ml na jeden otwór nosowy – dorośli; 60 ml na jeden otwór nosowy – dzieci), jednocześnie reguluj przepływ roztworu delikatnymi ruchami głowy w bok, aby roztwór który dostał się do nosa wypłynął drugim otworem nosowym.
- Powyższą czynność należy powtórzyć dla drugiego otworu nosowego.
- Nie połykaj roztworu.
- Po zakończeniu płukania oczyść nos przez wydychanie.
- Każdorazowo po zakończeniu płukania należy zdemonować butelkę do irygacji i dokładnie umyć wszystkie jej elementy – wypłukać czystą, gorącą wodą (do temperatury 100°C, nie wygotowuj elementów!). Następnie wszystkie elementy trzeba przetrzeć ręcznikiem papierowym, czystą ściereczką lub wysuszyć na powietrzu. Przechowywać w temp. pokojowej, w suchym miejscu niedostępnym dla dzieci.

Producent

VAN OOSTVEEN MEDICAL B.V.
Herenweg 269
3648 CH Wilnis, Holandia
info@romed.nl

Galeria

