

Zetuvit Plus, kompres jałowy, 10 x 10 cm, 1 sztuka

Cena: 13,94 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Odleżyny, Owrzodzenia, Rana
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zetuvit Plus to wysoce chłonny, czterowarstwowy opatrunek medyczny o wymiarach 10 x 10 cm, przeznaczony do stosowania na rany z obfitym wysiękiem.

Wskazania

Produkt wskazany jest do stosowania na rany powierzchniowe, silnie sączące się, zarówno ostre, jak i przewlekłe np. odleżyny, owrzodzenia podudzi, owrzodzenia nowotworowe.

Działanie

Opatrunek Zetuvit Plus wykazuje się dużymi właściwościami chłonnymi dzięki hydrofilowej pulpie celulozowej, która pochłania wysięk i zawarte w nim enzymy, bakterie proteolityczne, a także martwicę rozpuszczalną. Dzięki szybkiemu odprowadzeniu wysięku kontakt rany z czynnikami spowalniającymi leczenie jest ograniczony i krótkotrwały, co zapobiega maceracji skóry i wspiera szybsze gojenie się. Miękkość warstwy chłonnej dodatkowo wykazuje właściwości wyścielające ranę. Hydrofobowa warstwa zewnętrzna zapobiega przeklejeniu się opatrunku i równomiernie rozprowadza wysięk po całej jego powierzchni. Strona przeciwna do rany wyposażona jest we włókninę przepuszczającą powietrze, jednak szczelną dla płynów, dzięki czemu wydzielina nie wydostaje się poza opatrunek.

Skład

Dwie zewnętrzne warstwy wykonane zostały z włókniny, natomiast warstwy zewnętrzne wytworzono z hydrofilowych włókien celulozowych.

Stosowanie

1. Dobierz odpowiedni rozmiar opatrunku, tak aby zakrywał całą ranę i około 1-2 cm zdrowej skóry wokół niej.
2. Przyłóż opatrunek białą stroną do rany. Zielona warstwa powinna znajdować się po zewnętrznej stronie.
3. Zabezpiecz opatrunek przylepcem, opaską lub opaską uciskową. Można go stosować również z kompresjoterapią.

Ostrzeżenia



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Nie przycinać opatrunku.
- Produkt jednorazowego użytku.
- Nie używać jeśli opakowanie indywidualne jest uszkodzone lub otwarte.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice