

Zetuvit Plus, kompres jałowy, 10 x 20 cm, 1 sztuka

Cena: 26,47 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla dziecka, Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zetuvit Plus to wysokochłonny opatrunek, który przeznaczony do zaopatrywania ran silnie sączących. Warstwa chłonna wiąże wydzielinę, nie pozwalając jej wydobywać się na zewnątrz.

Wskazania

Zetuvit Plus nadaje się do stosowania w przypadku ran powierzchniowych, silnie sączących, ostrych lub przewlekłych (takich jak odleżyny, owrzodzenia podudzia, owrzodzenia nowotworowe itp).

Działanie

Zetuvit Plus to opatrunek z superabsorbentem, który skutecznie wchłania wysięk i wydzielinę z rany. Dzięki temu, że jest zdolny do zatrzymywania płynów wewnątrz, chroni przed ich wyciekami na zewnątrz. Odprowadzenie wysięku z rany ma kluczowe znaczenie dla procesu gojenia, ponieważ eliminuje czynniki hamujące leczenie, takie jak proteazy. Dzięki temu rana może się szybciej zagoić. Zetuvit Plus wyróżnia się wysoką zdolnością wchłaniania, co pozwala na rzadsze zmienianie opatrunku. Dzięki temu rana może się goić w spokoju, a jednocześnie zwiększa się ochrona przed zanieczyszczeniem. Opatrunek ma również właściwości wyścielające, co przyczynia się do komfortu i ochrony rany.

Sposób użycia

Wybrać odpowiednią wielkość kompresu Zetuvit Plus, tak by opatrunek przykrywał całą ranę i dodatkowo 1–2 cm wokół niej. Opatrunku nie wolno przycinać. Zetuvit Plus przyłożyć do rany białą stroną. Zielona warstwa specjalnej włókniny ma znajdować się po stronie przeciwnej do rany. Przymocować opatrunek, używając do tego celu przylepca, opaski, lub w razie potrzeby, opaski uciskowej. Zmiana opatrunku jest konieczna, jeśli jest to wskazane klinicznie, jeśli wysięk dotrze do brzegu kompresu chłonnego lub jeśli przeniknie przez zieloną warstwę specjalnej włókniny.

Ostrzeżenia

- Nie przycinać opatrunku.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

- Produkt jednorazowego użytku.
- Nie używać jeśli opakowanie indywidualne jest uszkodzone lub otwarte.

Producent

HARTMANN
Partyzancka 133/151
Pabianice