

ZETUVIT Plus Opatrunek jałowy 10x10cm, 10 sztuk

Cena: 137,54 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 sztuk
Postać	Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla dziecka, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zetuvit Plus to medyczny opatrunek o wysokiej chłonności, składający się z czterech warstw, o rozmiarze 10 x 10 cm. Został zaprojektowany z myślą o leczeniu ran, które wydzielają dużą ilość płynu.

Wskazania

- Produkt wskazany jest do stosowania na rany powierzchniowe, silnie sączące się, zarówno ostre, jak i przewlekłe np. odleżyny, owrzodzenia podudzi, owrzodzenia nowotworowe.
- W przypadku ran zainfekowanych opatrunek można stosować w kombinacji z opatrunkami o działaniu przeciwbakteryjnym.

Dawkowanie

Opatrunek Zetuvit Plus wykazuje się dużymi właściwościami chłonnymi dzięki hydrofilowej pulpie celulozowej, która pochłania wysięk i zawarte w nim enzymy, bakterie proteolityczne, a także martwicę rozpuszczalną. Dzięki szybkiemu odprowadzeniu wysięku kontakt rany z czynnikami spowalniającymi leczenie jest ograniczony i krótkotrwały, co zapobiega maceracji skóry i wspiera szybsze gojenie się. Miękkość warstwy chłonnej dodatkowo wykazuje właściwości wyścielające ranę. Hydrofobowa warstwa zewnętrzna zapobiega przeklejaniu się opatrunku i równomiernie rozprowadza wysięk po całej jego powierzchni. Strona przeciwna do rany wyposażona jest we włókninę przepuszczającą powietrze, jednak szczelną dla płynów, dzięki czemu wydzielina nie wydostaje się poza opatrunek.

Skład

Dwie zewnętrzne warstwy wykonane zostały z włókniny, natomiast warstwy wewnętrzne wytworzono z hydrofilowych włókien celulozowych.

Stosowanie

1. Dobierz odpowiedni rozmiar opatrunku, tak aby zakrywał całą ranę i około 1-2 cm zdrowej skóry wokół niej.
2. Przyłóż opatrunek białą stroną do rany. Zielona warstwa powinna znajdować się po zewnętrznej stronie.
3. Zabezpiecz opatrunek przylepcem, opaską lub opaską uciskową. Można go stosować również z kompresjoterapią.



APTEKA "POD GWIAZDĄ I" SP. Z O.O.
Ul. Azalii Pontyjskiej 2A, Nowa Sarzyna
+48 500 623 943

Ostrzeżenia

- Nie przycinać opatrunku.
- Produkt jednorazowego użytku.
- Nie używać jeśli opakowanie indywidualne jest uszkodzone lub otwarte.

Producent

PAUL HARTMANN Polska Sp. z o.o
Żeromskiego 17
95-200 Pabianice