

Zetuvit Plus Silicone Border, 20 x 25 cm, opatrunek z silikonem, 1 opatrunek

Cena: 63,58 zł



Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	1 sztuka
Postać	, Opatrunek
Producent	PAUL HARTMANN POLSKA SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Ochronne
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla młodzieży, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zetuvit Plus Silicone Border to opatrunek wyposażony w silikonową warstwę kontaktową oraz chłonny wkład, przeznaczony do leczenia ran ostrych i przewlekłych o umiarkowanym lub dużym wysięku.

Wskazania

Opatrunek Zetuvit Plus Silicone Border nadaje się najlepiej do stosowania w leczeniu ran ostrych (rany po poparzeniach i urazach) lub przewlekłych (owrzodzenia żylakowe, owrzodzenia odleżynowe, stopa cukrzycowa, rany nowotworowe) o wysięku umiarkowanym do dużego.

Sposób użycia

- Oczyszczyć ranę roztworem soli fizjologicznej lub zgodnie z instrukcją lekarza.
- Wybrać odpowiednią do rany wielkość opatrunku, upewniając się, że wkład środkowy wychodzi poza krawędzie rany na około 1 do 2 cm. Nie przecinać zielonego wkładu chłonnego. Przezroczyste obrzeże można przycinać do kształtu rany, np. o wklęsłym kształcie.
- Po przemyciu rany, a przed nałożeniem opatrunku, należy się upewnić, że otaczająca skóra jest sucha (do osuszenia należy użyć wacików) w celu zapewnienia przylegania opatrunku.
- Zdjąć dwie warstwy ochronne. Opatrunek przyłożyć do rany przylegającą stroną. Zielona strona ma znajdować się po stronie przeciwnej do rany.
- W celu unieruchomienia opatrunku należy docisnąć brzegi z klejem i unikać zagnieceń na obrzeżu.
- Nie jest wymagane stosowanie dodatkowego mocowania. Jeśli jest to wskazane, można założyć bandaż uciskowy, zgodnie z instrukcją lekarza.
- Opatrunek może pozostać na ranie do trzech dni, w zależności od stanu rany i ustalonego protokołu klinicznego.
- Zmiana opatrunku jest konieczna, jeśli jest to wskazane klinicznie lub gdy wysięk dotrze do brzegu wkładu chłonnego.



Przeciwwskazania

Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników.

Ostrzeżenia

- Nie przycinać zielonego wkładu chłonnego. Przezroczyste obrzeże można przyciąć do kształtu rany, np. o wklęsłym kształcie.
- Przed rozpoczęciem leczenia rany, której gojenie przebiega nieprawidłowo, należy skonsultować się z lekarzem w celu ustalenia przyczyn takiego stanu.

Leczenie rany z wykorzystaniem opatrunku Zetuvit Plus Silicone Border nie może zastąpić przyczynowego leczenia nieprawidłowego gojenia się rany. Jeśli występują kliniczne objawy przedmiotowe zakażenia, przed zastosowaniem tego opatrunku należy wyleczyć zakażeniem stosując odpowiednie leczenie.

- We wszystkich przypadkach należy przestrzegać ustalonego protokołu klinicznego.
- Nie są dostępne informacje wskazujące na korzyści ze stosowania opisywanego kompresu u osób wrażliwych, takich jak niemowlęta, dzieci, kobiety w ciąży lub kobiety karmiące, podobnie jak nie są dostępne dane o braku takich korzyści, dlatego w tych populacjach opisywany kompres należy stosować z zachowaniem ostrożności i zgodnie ze wskazówkami lekarza.

Producent

HARTMANN POLSKA