

Zuma Noka 0.2 ulga dla oczu , krople do oczu z hialuronianem 0,2 %, 10 ml



Cena: 61,52 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople do oczu
Producent	S-LAB SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące, Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zuma Noka 0,2 to medyczny preparat w formie kropli do oczu, zawierający 0,2% roztwór hialuronianu sodu o właściwościach nawilżających. Produkt dostępny jest w butelce o pojemności 10 ml i przeznaczony do łagodzenia dolegliwości związanych z suchością oczu.

Wskazania

Zuma Noka 0,2 ulga dla oczu przeznaczony jest do:

- nawilżania i łagodzenia objawów związanych z zespołem suchego oka,
- łagodzenia podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze, działaniem czynników zewnętrznych (wiatr,

słońce, suche powietrze, słona woda, dym, kurz, klimatyzacja, ogrzewanie),

- przeciwdziałania podrażnieniom spojówek podczas noszenia soczewek kontaktowych.

Działanie

Wyrób medyczny Zuma Noka 0,2 ulga dla oczu: są nawilżającymi kroplami do oczu zawierającymi 0,2% roztwór hialuronianu sodu, otrzymywany na drodze syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu ze względu na swoje szczególne właściwości fizykalne, lepkością i zdolność przylegania do rogówki, poprawia stabilność filmu łzowego i komfort widzenia.

Skład

Hialuronian sodu 0,2%, gliceryna, fosforan dwusodu, chlorek sodu, cetymid, dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu, wodorotlenek sodu, woda oczyszczona.



Sposób użycia

- Krople do oczu Zuma Noka ulga dla oczu 0,2 należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
- Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakropić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy wkropić następną.
- Delikatnie zamrużyć okiem. Zamknąć butelkę.
- Po zakropleniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
- Zakraplać 1 krople do oka 2-3 razy dziennie.
- Jeżeli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, należy stosować krople przed snem i po przebudzeniu

Przeciwwskazania

- Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu.
- Nie stosować na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych.
- Nie stosować w przypadku bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych zapaleń oka. W wymienionych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.
- Zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem.
- Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza do oka lub innych powierzchni, aby nie zanieczyścić roztworu.
- Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.
- Nie przechowywać w temperaturze powyżej 25°C.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Nie stosować dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Producent

S-LAB
Kiełczowska 2
55-095 Mirków