

Zuma Noka 0.2 ulga dla oczu , krople do oczu z hialuronianem 0,2 %, 10 ml



Cena: 22,75 zł

Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZUMA
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople
Producent	S-LAB SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

Opis produktu

Opis

Zuma Noka (ulga) dla oczu 0,2 to krople nawilżające do oczu, zawierające 0,2% roztwór hialuronianu sodu. Przeznaczone są do łagodzenia objawów zespołu suchego oka, przynoszą ulgę w przypadku podrażnień, zaczerwienienia i zmęczenia oczu wynikającego m.in. z długotrwałej pracy przy komputerze, oddziaływania czynników zewnętrznych, takich jak wiatr, słońce, suche powietrze czy słona woda. Ponadto, krople te mogą przeciwdziałać podrażnieniu spowodowanemu noszeniem soczewek kontaktowych.

Składniki

Hialuronian sodu 0,2%, fosforan dwusodu, chlorek sodu, dwuwodorofosforan sodu, wersenian czterosodu, woda oczyszczona.

Zastosowanie

Łagodzenie objawów związanych z zespołem suchego oka, podrażnienia, zaczerwienienia, zmęczenie oczu.

Sposób użycia

- Krople do oczu Zuma Noka ulga dla oczu 0,2 należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
- Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakropić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy wkropić następną.
- Delikatnie zamrużyć okiem. Zamknąć butelkę.
- Po zakropleniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
- Zakraplać 1 krople do oka 2-3 razy dziennie.
- Jeżeli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, należy stosować krople przed snem i po przebudzeniu.

Przeciwwskazania



- Nie stosować w przypadku uczulenia na składniki preparatu. W przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy przerwać stosowanie preparatu.
- Nie stosować na oko zranione lub po zabiegach chirurgicznych.
- Nie stosować w przypadku bakteryjnych, grzybiczych lub wirusowych zapaleń oka. W wymienionych przypadkach należy skontaktować się z lekarzem.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wydrukowanego na opakowaniu.
- Nie stosować dłużej niż 30 dni od otwarcia opakowania. Niewykorzystany roztwór należy wyrzucić.

Ostrzeżenia

- Zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem.
- Nigdy nie dotykać końcówką zakraplacza do oka lub innych powierzchni, aby nie zanieczyścić roztworu.
- Preparat przeznaczony tylko do użytku zewnętrznego.
- Nie używać, jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Przechowywać w sposób niedostępny dla dzieci.

Producent

S-LAB Sp. z o.o.
ul. Kiełczowska 2
55-095 Mirków, Polska.