

## ZUMA Ulga dla oczu z hialuronian. 0,4%



Cena: 19,86 zł

### Opis słownikowy

Dla kogo	Dla kobiet, Dla mężczyzn
Marka	ZUMA
Opakowanie	10 ml
Postać	Krople
Producent	S-LAB SP. Z O.O.
Przeznaczenie	Łagodzące (kojące), Nawilżające
Rodzaj produktu	Wyrób medyczny
Wiek	Dla dorosłych, Dla seniorów

### Opis produktu

#### Opis

**Zuma Noka (ulga) dla oczu 0,4** to nawilżające krople do oczu, które zawierają 0,4% roztwór hialuronianu sodu, pozyskiwanego w procesie syntezy biotechnologicznej. Hialuronian sodu, ze względu na swoje unikalne właściwości fizyczne, takie jak lepkość, elastyczność i zdolność do przylegania do rogówki, przyczynia się do poprawy stabilności filmu łzowego, co z kolei wpływa na komfort widzenia.

#### Składniki

Hialuronian sodu 0,4%, fosforan dwusodu, dwuwodorofosforan sodu, chlorek sodu, wersenian czterosodu, chlorek benzalkoniowy, woda oczyszczona.

#### Zastosowanie

Łagodzenie objawów związanych z zespołem suchego oka, przy podrażnieniach, zaczerwienieniach i zmęczeniu oczu spowodowanych zbyt długą pracą przy komputerze, działaniem czynników zewnętrznych, przeciwdziałaniu podrażnieniu spojówek podczas noszenia soczewek kontaktowych.

#### Sposób użycia

- Krople do oczu Zuma Noka ulga dla oczu 0,4 należy stosować tylko zewnętrznie, miejscowo do worka spojówkowego.
- Przed użyciem preparatu należy dokładnie umyć ręce. Zdjąć nakrętkę i zakropić preparat do oka. Jeżeli kropla nie trafiła do oka, należy wkropić następną.

Delikatnie zamrunąć okiem. Zamknąć butelkę.

- Po zakropieniu kropli, nie zakraplać/ płukać powierzchni oka wodą ani żadnym innym płynem.
- Zakraplać 1 kroplę do oka 2-3 razy dziennie.



- Jeżeli pacjent nie zdejmuje soczewek kontaktowych na noc, należy stosować krople przed snem i po przebudzeniu.

#### **Przeciwwskazania**

- Nie stosować w przypadku nadwrażliwości na którykolwiek ze składników.
- Nie stosować po upływie terminu ważności wyrobu medycznego.
- Nie stosować jeśli opakowanie jest uszkodzone.
- Nie stosować w przypadku infekcji bakteryjnych, wirusowych lub grzybiczych.
- Nie stosować na zranione oko lub po zabiegach chirurgicznych
- Wyrób medyczny do wielokrotnego użytku powinien być stosowany wyłącznie przez jedną osobę.
- Soczewki kontaktowe oraz inne leki okulistyczne można stosować po upływie 10-15 minut od momentu zastosowania kropli.  
Zdjąć soczewki kontaktowe przed użyciem.

#### **Ostrzeżenia**

To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

#### **Producent**

S-LAB Sp. z o.o.  
ul. Kiełczowska 2  
55-095 Mirków, Polska.